


Digitale 10-knops handbediening

Let op u heeft een bed met een digitale handbediening. Om de kwaliteit en duurzaamheid van ons product te verhogen zijn wij in 2025 overgestapt op digitale handbedieningen. Hieronder een korte functie omschrijving.

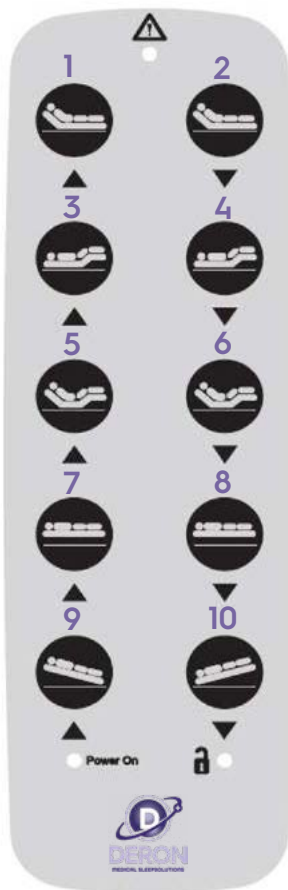

Nr	Omschrijving
1	Verstelling ruggedeelte omhoog.
2	Verstelling ruggedeelte omlaag.
3	Verstelling beengedeelte omhoog.
4	Verstelling beengedeelte omlaag.
5	Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omhoog.
6	Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omlaag.
7	Ligvlak omhoog
8	Ligvlak omlaag
9	Anti- Trendelenburg (comfortstand). Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".
10	Trendelenburg. Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".
8	Bed naar de laagste stand: Zorg dat de handbediening volledig ontgrendeld is met het sleuteltje op de achterkant. Houd knop 8 minimaal 4 seconden ingedrukt. Daarna voor veiligheid het bed weer vergrendelen met de sleutel op de achterkant.
7+8	Resetten 1. Zorg dat de handbediening ontgrendeld is door met de sleutel de knop op de achterkant volledig naar links te draaien. 2. Druk de knop 7 en 8 tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt. Het bed gaat nu alle mogelijke standen af en eindigt in de onderste stand. 3. Als de motor 3 keer piept is de reset klaar en kunnen de knoppen losgelaten worden. 4. Vergrendel de handbediening nu weer met de sleutel op de achterkant.