


Digitale 9/10-knops handbediening

Deze handbediening hoort bij de digitale ligvlakmotor (type nr. **94772**) en de digitale hefboommotor (type nr. **94770** bij normale bedden, **95857** bij heavy duty bedden.)

Deze handbediening is te herkennen aan het Deron logo onder de knoppen

Functie omschrijving

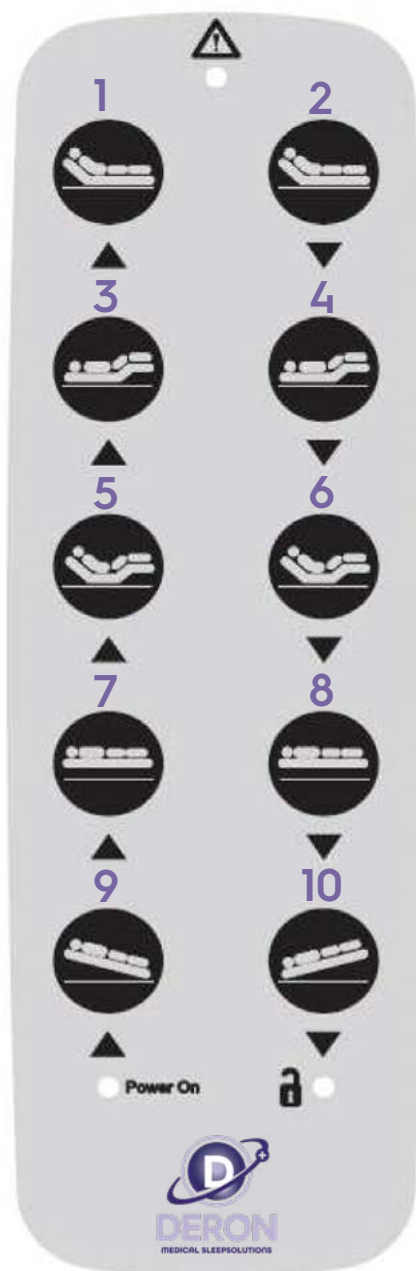

Nr	Omschrijving
----	--------------

- | | |
|-----|--|
| 1 | Verstelling ruggedeelte omhoog. |
| 2 | Verstelling ruggedeelte omlaag. |
| 3 | Verstelling beengedeelte omhoog. |
| 4 | Verstelling beengedeelte omlaag. |
| 5 | Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omhoog. |
| 6 | Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omlaag. |
| 7 | Ligvlak omhoog. |
| 8 | Ligvalk omlaag. |
| 9 | Anti- Trendelenburg (comfortstand).
Omlaag druk op knop 8. |
| 10 | Trendelenburg.
Omlaag druk op knop 8. |
| 8 | Bed naar de laagste stand: Zorg dat de handbediening volledig ontgrendeld is met het sleuteltje op de achterkant. Houd knop 8 minimaal 4 seconden ingedrukt. Daarna voor veiligheid het bed weer vergrendelen met de sleutel op de achterkant. |
| 7+8 | Resetten
1. Zorg dat de handbediening ontgrendeld is door met de sleutel de knop op de achterkant volledig naar links te draaien.
2. Druk de knop 7 en 8 tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt. Het bed gaat nu alle mogelijke standen af en eindigt in de onderste stand.
3. Als de motor 3 keer piept is de reset klaar en kunnen de knoppen losgelaten worden.
4. Vergrendel de handbediening nu weer met de sleutel op de achterkant. |