


Standaard 9/10-knops handbediening

Deze handbediening hoort bij de standaard ligvlakmotor (type nr. **94694**) en de standaard hefboommotor (type nr. **91154**)

Deze handbediening is te herkennen omdat er geen logo op staat.

Functie omschrijving

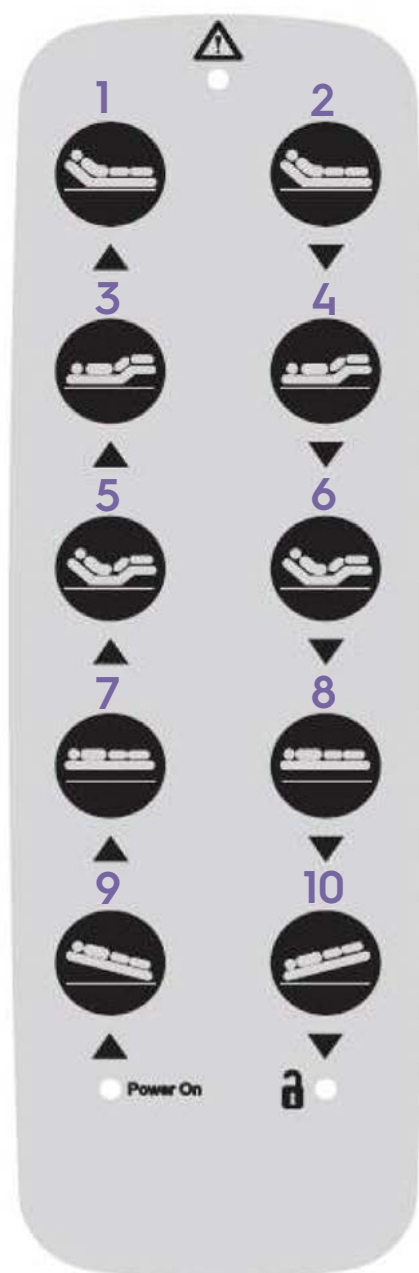

Nr	Omschrijving
1	Verstelling ruggedeelte omhoog.
2	Verstelling ruggedeelte omlaag.
3	Verstelling beengedeelte omhoog.
4	Verstelling beengedeelte omlaag.
5	Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omhoog.
6	Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk omlaag.
7	Ligvlak omhoog.
8	Ligvlak omlaag.
9	Anti- Trendelenburg (comfortstand). Omlaag druk op knop 8.
10	Trendelenburg. Omlaag druk op:knop 8.
7+8	Bed naar de laagste stand: Druk de knoppen ligvlak omhoog en ligvlak omlaag tegelijkertijd in.
7+8	Resetten 1. Zorg dat de handbediening ontgrendeld is door met de sleutel de knop op de achterkant volledig naar links te draaien. 2. Zet het bed in de laagste stand door de ligvlak omhoog en ligvlak omlaag knoppen tegelijkertijd in te drukken. 3. Druk nu de ligvlak omhoog en ligvlak omlaag knoppen 3 keer tegelijkertijd kort in. 4. Het resetten is nu klaar. 5. Vergrendel de handbediening nu weer met de sleutel op de achterkant.