



# Bedhek-bepolstering Reiniging & desinfectie





# Bedhek-bepolstering anti-scheur

- + Beschermst de cliënt tegen verwondingen.
- + Gemaakt van comfortabele en duurzame.
- + Afneembaar en eenvoudig te reinigen.
- + Voorzien van een instopstrook en bevestigingsclips voor stevige bevestiging.
- + Gevuld met zachte vulling voor extra comfort.

## Reiniging

### ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-bepolstering minimaal 1x per jaar tot 95°C met een van de geschikte desinfectiemiddelen.\* Gebruik geen Jodtinktur.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant\* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

\*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.



Krimp na wassen ≤ 8%.

Antimicrobieel effect kan gereduceerd zijn na wassen.





## Bedhek-bepolstering 3D grijs

- + Beschermst de cliënt tegen verwondingen.
- + Gemaakt van luchtdoorlatende stof met een open structuur.
- + Voorzien van zachte vulling voor extra comfort.
- + Voorzien van een instopstrook en bevestigingsclips voor stevige bevestiging.

### Reiniging

#### ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-bepolstering minimaal 1x per jaar tot 60°C.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant\* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

\*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.







## Bedhek-beschermer 3D blauw

- + Voorkomt verwondingen.
- + Bestaat uit een enkele laag stof zonder vulling.
- + Kan standaard om het onrusthek blijven zitten door een andere bevestiging.
- + Verkrijgbaar voor zowel om het hout van het onrusthek als voor over de vergrendeling van de bedhekken.


### Reiniging

#### ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-beschermer minimaal 1x per jaar tot 60°C.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant\* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

\*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.

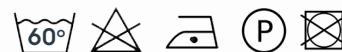



# Desinfectiemiddelen

| Product naam                         | Hoeveelheid |
|--------------------------------------|-------------|
| Incidin Plus (Ecolab)                | 2%          |
| Kodan Tinktur Forte (Schulke)        | Puur        |
| Mikrobac Forte (Hartmann)            | 4%          |
| Sodiumhypochlorite (Standaard)       | 1000 ppm    |
| Octenispect (spray) (Schulke)        | Puur        |
| P3-topax 66 (Ecolab)                 | 5%          |
| Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser) | Puur        |
| Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)  | Puur        |
| Spring (kalle Original)              | Puur        |
| Sprint 200 (Diversey)                | 2%          |
| Suma Bac D10 (Johnson Diversey)      | 1%          |
| Surfa'Safe (Anios Laboratories)      | Puur        |
| Topmax 421 (Ecolab)                  | 5%          |
| Virkon (Du Pont)                     | 10 g/l      |

| Product naam                                | Hoeveelheid |
|---|-------------|
| Volvone (Oyar)                              | 40%         |
| Actichlor Plus (Ecolab)                     | 1000 ppm    |
| Anios DDHS (Anios Laboratories)             | Puur        |
| B45 (Orochemie)                             | Puur        |
| Bacillol 30 Foam (Hartmann)                 | Puur        |
| Clinell Sporicidal Wipes (Garna Healthcare) | Puur        |
| Chlor-Clean tablets (Guest Medical)         | 1000 ppm    |
| Dettol (Reckitt Benckiser)                  | 5%          |
| Dismozon Pur (Hartmann)                     | 4%          |
| Formaldehyde (Pharmacy)                     | 30%         |
| Germatol (kiarah Chem)                      | 5%          |
| Hansamed (spray) (beiersdorf AG)            | Puur        |
| Haz-Tabs (Guest Medical)                    | 1000 ppm    |
| Hibicet (Molnlycke Health Care)             | puur        |
| Incidin Extra N (Ecolab)                    | 2%          |





**DERON B.V.**

Willem Alexanderstraat 5 - NL - 6691 EE Gendt - +31 (0)481 45 13 44 - [info@deron.nl](mailto:info@deron.nl) - [www.deron.nl](http://www.deron.nl)

**IBAN** NL56RABO0112192254 - **KVK** 10148150 - **BTW** NL815750043B01 - **EORI-nummer** NL815750043