

Handleiding matrashouder set niet-elektrische bodem

1a.



Zorg ervoor dat je de **voetbeugel** aan de kant van je voeten op de bodem plaatst, zoals op de afbeeldingen hierboven.

1b.



2a.



Knijp de **kleinere beugel** een beetje in elkaar.

2b.



Terwijl je de beugel in elkaar knijpt, kun je deze op de lattenbodem bevestigen.

2c.



Laat de beugel los zodra deze niet verder naar beneden kan. De beugel zit nu vast.

3.



Voer stap 2 uit aan beide kanten: twee keer bij het hoofdeind en twee keer bij het voeteneind.

Handleiding matrashouderset elektrische bodem

1a.



Zorg ervoor dat je de **voetbeugel** aan de kant van je voeten op de bodem plaatst, zoals op de afbeeldingen hierboven.

1b.



Let er wel op dat je de voetbeugel op het **beweegbare gedeelte** van de bodem plaats. Dit is belangrijk omdat de matrashouders meebewegen als de bodem omhoog of omlaag gaat.

2a.



Knijp de **kleinere beugel** een beetje in elkaar.

2b.



Terwijl je de beugel in elkaar knijpt, kun je deze op de lattenbodem bevestigen.

2c.



Laat de beugel los zodra deze niet verder naar beneden kan. Controleer of de beugel op het **beweegbare deel** zit.

3.



Herhaal stap 2 aan beide kanten: twee keer bij het hoofdeind en twee keer bij het voeteneind. De matrashouders zijn bevestigd.