

Handleiding Papegaai



1. Beoogd gebruik

Deze papegaai ondersteunt bij het verplaatsen in bed en bij het overeind komen. De triangel fungeert als handvat om de mobiliteit van de gebruiker te vergroten. De papegaai kan gebruikt worden door mobiele en niet-mobiele gebruikers. De papegaai kan ondersteunen bij een beperking van de zorgbehoevende, maar ook als ondersteuning bij de therapeutische behandeling. De papegaai is geschikt voor volwassen zorgbehoevenden met een lichaamslengte vanaf 146 cm en een gewicht tussen de 40 kg en 175 kg.

Hierbij is het van belang dat de gebruiker niet met het volledige gewicht aan de triangel gaat hangen, de papegaai kan een maximaal trekgewicht van 75 kg aan.

2. Varianten

Deze Papegaai is verkrijgbaar in twee varianten. De automatisch oprolbare wordt gebruikt indien er vaker van de greephoogte gewisseld moet worden. De handverstelbare spreekt voor zich.



Papegaai met afrolbare triangel



Papegaai met verstelbare triangel



Om de veiligheid van de gebruiker en de bediener te garanderen, overschrijd het maximale gewicht van 75 kg voor deze optie niet.

3. Montage



Papegaaihouder

Deze accessoire kan eenvoudig ten allen tijden op het bed gemonteerd, maar ook gedemonteerd, worden. De papegaai kan namelijk in de daarvoor bestemde papegaaihouder bevestigd worden. Deze is standaard in het bed gemonteerd. Deze papegaaihouder bevindt zich bij het hoofdeinde in de hoek van het ligvlak aan zowel de linker als de rechter kant.

1. Steek de stang van de papegaai in de papegaaihouder bij het hoofdeinde.
2. Controleer vervolgens of de triangel achter de borgpen bevestigd is.

De papegaai is nu klaar voor gebruik.