



# Handleiding Presstige<sup>®</sup> zitkussens



| Productnaam                                                    | Presstige® zitkussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsomvang                                                | Decubitus therapie-zitkussen met schuimkern en PU-hoes (afneembaar met ritssluiting), gebruiksaanwijzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicaties / toepassingsgebieden                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profylaxe door decubitus</li> <li>• Decubitusbehandeling tot graad 2</li> <li>• Pijntherapie</li> <li>• Voor patiënten met een zeer hoog risico op decubitus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contra-indicaties                                              | Niet bekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toegestaan patiëntgewicht min. - Max.                          | Roze: 60-90 kg Grijs/Roze : 90-110 KG Grijs: 110-150 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiaal                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kern: PU-schuimen ( Visco)</li> <li>• Hoes: PU-gecoat PES-dragermateriaal, antislip onderkant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensies                                                      | Zie label op het product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Productgewicht                                                 | Alle maten ca. 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steunnummer (zoals gedefinieerd in § 139 SGB V)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medisch apparaat                                               | Klasse I, MDR 2017/745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technische veiligheid / vlamvertraging                         | Vlamvertragende test volgens DIN EN 597 I + II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Testen op toxicologische onschadelijkheid / biocompatibiliteit | DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waarschuwingen                                                 | Vóór de eerste toepassing moet het systeem voor het eerste gebruik worden voorbereid (zie "Het systeem voorbereiden voor gebruik").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantie                                                       | 3 jaar op de functionele eigenschappen van de schuimkern (pro rata garantie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Onderhoud                                                      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reinigingsinstructies (kussensloop)                            | <p>De hoes kan worden gedesinfecteerd door deze af te vegen met in de handel verkrijgbare desinfectiemiddelen gemaakt van isopropanol (bijv. Bacillol) of met andere geschikte DGHM-vermelde producten (bijv. ECOLABreinigingsdoekje Incidin OxyWipe S XL). Chemothermische reiniging van de hoes is mogelijk. De hoes kan autoclaaf worden behandeld volgens de richtlijnen van de WIP.</p>  |
| Reinigingsinstructies (kern)                                   | De schuimkern zonder hoes kan gewassen worden in de wasmachine op maximaal 60 C°. Daarna goed aan de lucht laten drogen, of in de droogtrommel op lage temperatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maak het systeem klaar voor gebruik                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haal het kussen uit de verpakking.</li> <li>2. Plaats het kussen op de zitting van de rolstoel of zitting, met de anti-slip laag aan de onderzijde.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         |