



Handleiding Presstige® zitkussens



Productnaam	Presstige® zitkussen
Leveringsomvang	Decubitus therapie-zitkussen met schuimkern en PU-hoes (afneembaar met ritssluiting), gebruiksaanwijzing
Indicaties / toepassingsgebieden	• Profylaxe door decubitus • Decubitusbehandeling tot graad 2 • Pijntherapie • Voor patiënten met een zeer hoog risico op decubitus
Contra-indicaties	Niet bekend
Toegestaan patiëntgewicht min. - Max.	Geel : 20-60 kg Roze: 60-90 kg Grijs/Roze : 90-110 KG Grijs: 110-150 KG
Materiaal	• Kern: PU-schuimen (Visco) • Hoes: PU-gecoat PES-dragermateriaal, antislip onderkant
Dimensies	Zie label op het product
Productgewicht	Alle maten ca. 1,5 kg
Steunnummer (zoals gedefinieerd in § 139 SGB V)	
Medisch apparaat	Klasse I, MDR 2017/745  
Technische veiligheid / vlamvertraging	Vlamvertragende test volgens DIN EN 597 I + II
Testen op toxicologische onschadelijkheid / biocompatibiliteit	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Waarschuwingen	Vóór de eerste toepassing moet het systeem voor het eerste gebruik worden voorbereid (zie "Het systeem voorbereiden voor gebruik").
Garantie	3 jaar op de functionele eigenschappen van de schuimkern (pro rata garantie)
Onderhoud	Nee
Reinigingsinstructies (kussensloop)	De hoes kan worden gedesinfecteerd door deze af te vegen met in de handel verkrijgbare desinfectiemiddelen gemaakt van isopropanol (bijv. Bacillol) of met andere geschikte DGHM-vermelde producten (bijv. ECOLABreinigingsdoekje Incidin OxyWipe S XL). Chemothermische reiniging van de hoes is mogelijk. De hoes kan autoclaaf worden behandeld volgens de richtlijnen van de WIP.      
Reinigingsinstructies (kern)	De schuimkern zonder hoes kan gewassen worden in de wasmachine op maximaal 60 C°. Daarna goed aan de lucht laten drogen, of in de droogtrommel op lage temperatuur.
Maak het systeem klaar voor gebruik	1. Haal het kussen uit de verpakking. 2. Plaats het kussen op de zitting van de rolstoel of zitting, met de anti-slip laag aan de onderzijde.