


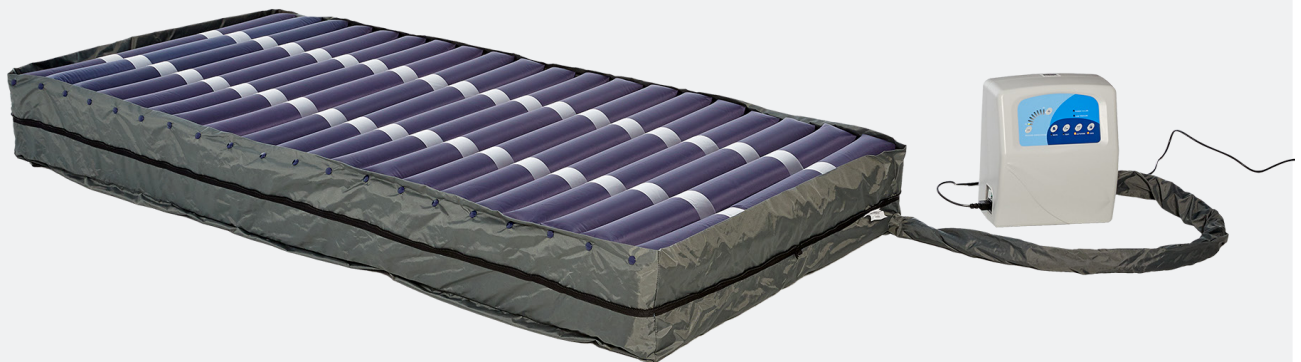

Low-air-Loss

Inzetbaar wanneer een behandeling extreme drukverlaging heeft.

SPECIFICATIES

- + Microklimaat-management
- + Wanneer extreme drukverlaging noodzakelijk is
- + CPR-ventiel 15 sec.
- + Tot 1000 liter lucht per minuut
- + 90/110 cm x 200 cm, max. gewicht tot 250kg
- + 120 cm x 200 cm, max. gewicht tot 350 kg
- + 25 cm hoog
- + Bij contra-indicatie voor dynamische therapie
- + Nylon PU
- + Binnenwerk tot 60°C wasbaar, hoes tot 95°C

EIGENSCHAPPEN

De Low-air-Loss is matrasvervangend en wordt ingezet indien een alternerend systeem niet mogelijk is vanwege een contra-indicatie. De Cellen hebben kleine gaatjes waardoor dit matras kan worden ingezet voor specifieke behandelingen waarbij extreme drukverlaging noodzakelijk is. Op dit matras ligt de cliënt meer omhuld dan erbovenop. Het matras werkt op twee manieren bij decubituspreventie: continue lage druk die contactdruk tussen huid en matras verlaagt en het ligoppervlak vergroot. De Low-air-Loss kent een hoge airflow om een thermische vochtgradiënt te creëren en het microklimaat te regelen, zodat de huid droog en koel blijft.

DE Q5 POMP

De Low-air-Loss wordt aangesloten op de Q5 blower die in een heel korte tijd veel lucht blaast. De pomp kan niet alterneren, maar zorgt ervoor dat de druk extreem wordt verlaagd. De blower schakelt automatisch naar de gewenste output en beschikt over alle mogelijke alarmen.

