



ProCell 512

Foambag-ruimte onder een laag van wisselende cellen.

SPECIFICATIES

- + Decubitus categorie 1/2
- + Constante lage druk of wisseldruktherapie
- + 85/90 cm breed, 200/210 cm lang
- + 13 cm hoog zonder onderlegmatras
- + Max. gebruikersgewicht 150 kg
- + Binnenwerk tot 60°C wasbaar, hoes tot 95°C
- + Matrasvervangend met onderlegmatras van 5 cm
- + Mogelijk om van 210 lengte 200 te maken
- + Nylon PU
- + Praktische transportfunctie, 8h autonomie
- + CPR-ventiel 18 sec.



EIGENSCHAPPEN

Dit Air-flow system bestaat uit een laag van wisselende Cellen (1 op 2) waar een foambag-ruimte onder zit om een onderlegmatras van 4 cm in te leggen. Zo wordt het matrasvervangend, zonder dat het matras daarbij te hoog is in combinatie met onrusthekken, of om uit bed te stappen. Uniek aan dit systeem is de mogelijkheid om van 210 lengte 200 te maken door de voeten-Cell leeg te laten lopen en los te koppelen.

DE POMPKEUZE

Afhankelijk van de toepassing kan op de ProCell 512 gekozen worden voor:

- Q2K-02: Met een manuele drukinstelling, alternerende cyclus (12 min.) of statische werking en een audiovisueel lagedruk alarm
- Q2K-03-digitale pomp: Met comfortinstelling, aanpasbare cyclustijd (10-15-20-25 min.), verzorgingsstand (Autofirm)

DE Q2K-03-DIGITALE POMP

Deze digitale pomp werkt alleen wanneer de Cellen dienen te wisselen, of om de interne druk op peil te houden. Hierdoor is deze pomp veel stiller en verbruikt minder stroom. Als optie kan gekozen worden voor de Autolock waarbij de drukknoppen vergrendeld worden en instellingen niet ongewild veranderd kunnen worden. De zorgverlener ondervindt tijdwinst d.m.v. een shortcut om de verpleegstand (Autofirm) sneller te activeren.