



SenSiva

Volledig automatisch voor zorgeloze preventie en behandeling van decubitus

SPECIFICATIES

- + Decubitus categorie 3/4
- + Continue lage druk/alternerend/pulsatie/Fowler/nursing
- + 90 cm breed, 200 cm lang, 20 cm hoog
- + Automatische transportfunctie, 8h autonomie
- + Max. gebruikersgewicht 250 kg
- + Gewichtsdetectie en drukdifferentiatie tussen Cellen
- + Binnenwerk tot 60°C wasbaar, hoes tot 95°C
- + Speciaal verstevigd PU
- + Matrasvervangend door Cell-on-Cell systeem
- + Aflopende hielzone (bij 90 cm breed)
- + CPR-ventiel 10 sec. ter hoogte van hielzone



EIGENSCHAPPEN

Dit ultieme Air-flow system wordt ingezet voor een behandeling waarbij extreme drukverlaging noodzakelijk is. Gewicht, positie en drukverplaatsing worden continue gemonitord en automatisch aangepast naar de optimale instelling. Samen met andere instellingen wordt de interne druk in realtime weergegeven op een scherm, waarbij het comfortnivo steeds naar wens kan worden aangepast. Aan de hand van een verborgen menu kan de verpleging, indien wenselijk, het systeem zelf instellen naar cyclustijd en Cell-variatie, tussen opgeblazen en lege Cellen. Een automatische Fowler functie past de druk vanzelf aan als het bed in een zitpositie gezet wordt. De SenSiva is matrasvervangend en heeft net als de OptiVa een aflopende hielzone.

DE NI POMP

De SenSiva werkt samen met een professionele digitale pomp: de NI. Deze detecteert wanneer de cliënt op het matras plaatsneemt en start een automatische drukmeting. Wanneer de meting is uitgevoerd, worden de verschillende drukniveaus volgens gebruikersgewicht op het LCD- scherm weergegeven.

De SenSiva is zowel krachtig als slim, met verschillende therapie mogelijkheden, zoals: alternerend, continue lage druk, pulsatie en automatische zitpositie. Drukdifferentiatie tussen de Cellen kan aangepast worden naargelang het gewenste comfort. Deze pomp beschikt over alle mogelijke alarmen om de werking te bewaken en houdt de looptijd bij voor traceerbaarheid en (preventie)onderhoud.