

Verschillen 10-knops handbediening

Er is een digitale 10-knops handbediening die vanaf nu geleverd zal worden op onze bedden. Deze handbediening werkt net iets anders als de standaard 10-knops handbediening. Om verwarring te voorkomen staan in deze handleiding alle verschillen.



Standaard 10-knops handbediening

- Verstelling ruggedeelte omhoog en omlaag.
- Verstelling beengedeelte omhoog en omlaag.
- Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk.
- Ligvlak omhoog en omlaag.
- Anti- Trendelenburg (comfortstand)
Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".
- Trendelenburg.
Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".

Bed naar de laagste stand: Druk de knoppen ligvlak omhoog en ligvlak omlaag tegelijkertijd in.

Resetten

1. Zorg dat de handbediening ontgrendeld is door met de sleutel de knop op de achterkant volledig naar links te draaien.
2. Zet het bed in de laagste stand door de **ligvlak omhoog en ligvlak omlaag** knoppen tegelijkertijd in te drukken.
3. Druk nu de **ligvlak omhoog en ligvlak omlaag** knoppen 3 keer tegelijkertijd kort in.
4. Het resetten is nu klaar.
5. Vergrendel de handbediening nu weer met de sleutel op de achterkant.



Digitale 10-knops handbediening

Deze handbediening is te herkennen aan het Deron logo onder de knoppen.

- Verstelling ruggedeelte omhoog en omlaag.
- Verstelling beengedeelte omhoog en omlaag.
- Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk.
- Ligvlak omhoog en omlaag.
- Anti- Trendelenburg (comfortstand).
Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".
- Trendelenburg.
Omlaag druk op: "De ligvlak omlaag-verstelling".

Bed naar de laagste stand: Zorg dat de handbediening volledig ontgrendeld is met het sleuteltje op de achterkant. Houd de ligvlak omlaag knop minimaal 4 seconden ingedrukt. Daarna voor veiligheid het bed weer vergrendelen met de sleutel op de achterkant.

Resetten

1. Zorg dat de handbediening ontgrendeld is door met de sleutel de knop op de achterkant volledig naar links te draaien.
2. Druk de **ligvlak omhoog en ligvlak omlaag knoppen** tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt. Het bed gaat nu alle mogelijke standen af en eindigt in de onderste stand.
3. Als de motor 3 keer piept is de reset klaar en kunnen de knoppen losgelaten worden.
4. Vergrendel de handbediening nu weer met de sleutel op de achterkant.