



Bedhek-bepolstering Reiniging & desinfectie





Bedhek-bepolstering anti-scheur

- + Beschermst de cliënt tegen verwondingen.
- + Gemaakt van comfortabele en duurzame.
- + Afneembaar en eenvoudig te reinigen.
- + Voorzien van een instopstrook en bevestigingsclips voor stevige bevestiging.
- + Gevuld met zachte vulling voor extra comfort.

Reiniging

ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-bepolstering minimaal 1x per jaar tot 95°C met een van de geschikte desinfectiemiddelen.* Gebruik geen Jodtinktur.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.



Krimp na wassen ≤ 8%.

Antimicrobieel effect kan gereduceerd zijn na wassen.



Bedhek-bepolstering 3D grijs

- + Beschermt de cliënt tegen verwondingen.
- + Gemaakt van luchtdoorlatende stof met een open structuur.
- + Voorzien van zachte vulling voor extra comfort.
- + Voorzien van een instopstrook en bevestigingsclips voor stevige bevestiging.


Reiniging

ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-bepolstering minimaal 1x per jaar tot 60°C.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.

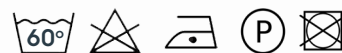



Bedhek-beschermer 3D blauw

- + Voorkomt verwondingen.
- + Bestaat uit een enkele laag stof zonder vulling.
- + Kan standaard om het onrusthek blijven zitten door een andere bevestiging.
- + Verkrijgbaar voor zowel om het hout van het onrusthek als voor over de vergrendeling van de bedhekken.


Reiniging

ALGEMEEN

Om de levensduur van de bedhek-bepolstering te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen.

- Was de bedhek-beschermer minimaal 1x per jaar tot 60°C.
- Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 graden is gewassen. Indien nodig een desinfectant* gebruiken.
- Na reiniging met desinfectiemiddelen op basis van chloor en alcohol MOET de incontinentiehoes met schoon water worden afgenomen.

*Bekijk op pagina 5 welke desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik.

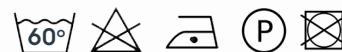

Desinfectiemiddelen

Product naam	Hoeveelheid
Incidin Plus (Ecolab)	2%
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm
Octenispect (spray) (Schulke)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur
Spring (kalle Original)	Puur
Sprint 200 (Diversey)	2%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur
Topmax 421 (Ecolab)	5%
Virkon (Du Pont)	10 g/l

Product naam	Hoeveelheid
Volvone (Oyar)	40%
Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
B45 (Orochemie)	Puur
Bacillol 30 Foam (Hartmann)	Puur
Clinell Sporicidal Wipes (Garna Healthcare)	Puur
Chlor-Clean tablets (Guest Medical)	1000 ppm
Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Germatol (kiarah Chem)	5%
Hansamed (spray) (beiersdorf AG)	Puur
Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Hibicet (Molnlycke Health Care)	puur
Incidin Extra N (Ecolab)	2%





DERON B.V.

Nijverheidsweg 9a - NL - 6691 EZ Gendt - +31 (0)481 45 13 44 - info@deron.nl - www.deron.nl

IBAN NL56RABO0112192254 - **KVK** 10148150 - **BTW** NL815750043B01 - **EORI-nummer** NL815750043