

Handleiding Sta-op-hulp



1. Beoogd gebruik

Deze stabiele Sta-op-beugel ondersteunt de gebruiker het in-en-uitbed stappen. De beugel wordt aan het frame van het bed gemonteerd. Uiteraard beweegt de Sta-op-beugel mee met de rug- en de hooglaag-verstellingen van het bed. De sta-op-hulp is geschikt voor volwassen zorgbehoevenden met een lichaamslengte vanaf 146 cm en een gewicht tussen de 40 kg en 175 kg.

Hierbij is het van belang dat de gebruiker niet met het volledige gewicht op de sta-op-hulp gaat hangen, de sta-op-hulp kan een maximaal gewicht van 75 kg aan.

2. Varianten

De sta-op-hulp is zowel links- als rechtszijdig te bestellen. De kant van het bed wordt bepaald vanaf het voeteneinde kijkend naar het bed.



Sta-op beugel



Om de veiligheid van de gebruiker en de bediener te garanderen, overschrijd het maximale gewicht van 75 kg voor deze optie niet.

3. Montage

De sta-op-hulp is zowel links- als rechtszijdig te bestellen. De sta-op beugel kan als volgt worden gemonteerd:



1. Haal het zwarte dopje uit het ligvlak aan de zijde waar de sta-op steun moet komen.
2. Zet het ruggedeelte in de hoogste stand.
3. Schuif het bevestigingspijpje in het ligvlak.
4. Zet het ruggedeelte weer horizontaal.
5. Schuif de bevestigingslip over het ligvlak en zet deze vast met een moer en een bout.

De sta-op-hulp is nu klaar voor gebruik.