

Aansluiten **Suuz**

medical anti-decubitus mattress system



Aansluiten SuuZ®



Deron B.V.
Nijverheidsweg 9a
NL - 6691 EZ Gendt
www.deron.nl
+31 (0)481 - 45 13 44

Versie: 2.0
Datum: Oktober 2021
Copyright: Deron B.V.



5.3 Aansluiten matras

Voor de in gebruikname van SuuZ® zijn de volgende richtlijnen:

1. Haal SuuZ® uit de plastic verpakking. Let er goed op dat bij het gebruik van scherpe voorwerpen de incontinentiehoes niet beschadigd.
 2. Leg het matras op het bed. De aanwijzing voor de wijze waarop het matras in bed moet worden gelegd is met symbolen op de incontinentiehoes verduidelijkt. "Deze zijde boven" is de bovenzijde en de voetjes zijn het voeteneind.
 3. Voor een drukverlagende werking:
 - Plaats het matras horizontaal op het bed. De opblaasslang moet gericht zijn naar het voeteneind, zodat ze kan worden aangesloten op de uitgangen van de powerunit (zie foto 1).
 - Bedek het matras met een laken om rechtstreeks huidcontact te vermijden en wrijving te beperken.
 4. Voor een drukverdelende werking:
 - Hang de powerunit over het kader of de plank aan het voeteneinde van het bed. Ga na of de powerunit veilig hangt/staat.
 - Rits de incontinentiehoes aan het voeteneind open en haal de luchtslang uit de hoes.
 - ☒- Sluit de rits van de incontinentiehoes.
 - ☒- Sluit de adapter aan op de powerunit. Let erop dat ze op de juiste wijze wordt aangesloten (zie foto 2).
 - Bedek het matras met een laken om rechtstreeks huidcontact te vermijden en wrijving te beperken.
- Ga na of de luchtslangen niet gekneld of geplooid zijn onder het matras.
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u nagaan of de elektrische spanning compatibel is.



5.4 Aansluiten powerunit SuuZ®

1. Steek de stekker in een stopcontact.
2. Schakel de stroom in door de schakelaar aan de rechterkant van de powerunit aan te zetten; de schakelaar staat nu in de positie ON ("I", zie foto 1).



- Let erop dat u de powerunit uitschakelt wanneer ze niet in gebruik is.
- Gebruik geen andere powerunit met andere specificaties dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het is gevaarlijk om een powerunit te gebruiken met een drukcapaciteit boven 120 mmHg. Dit kan ertoe leiden dat de luchtkamer gaat lekken.
- Verander zelf geen onderdelen. Als er een vervanging of een herstelling nodig is, dient u steeds uw lokale dealer of de fabrikant te benaderen.



Voor cliënten:

Met een aangesloten powerunit op dit alternerend matras waarbij de luchtkamers in een 1 op 3 cyclus van 12 minuten zullen wisselen, ervaart u een beweging van het matras. Dit is normaal. Op deze manier ontstaat er een wisseldruk op het ligvlak. Bedek het matras met een laken om rechtstreeks huidcontact te vermijden.



Manuele controle:

In de alternerende modus kunt u controleren of de druk onder het lichaam afneemt door een hand tussen het matras en de huid van de cliënt te steken (over een minder hard opgeblazen compartiment).





Brandveiligheid

Het matrassen met IC hoës voldoen aan de Crib 7 Norm. Het schuim voldoet aan: BS EN 1021-1 en BS EN 1021-2 en BS EN 597-1 en 597-2. De incontinentiehoës voldoet aan de BS 7571-Crib 7 norm. Alle matrassen voldoen aan: CE klasse 1.



DERON B.V.

Nijverheidsweg 9a - NL - 6691 EZ Gendt

+31 (0)481 45 13 44 - info@deron.nl - www.deron.nl