

# Reiniging Matrassen en hoezen



## Het doel van het reinigen

- Het voorkomen van besmetting van de patiënt.
- Het voorkomen van besmetting van de medewerker.
- De conditie van de matrashoes behouden.

## Dagelijkse schoonmaak

- Bij een incontinentie hoes. Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken met een natte schone doek die boven de 80 grade is gewassen. Indien nodig een desinfectant gebruiken.

## Patient wissel schoonmaak

- Na iedere wisseling van patiënt dient de hoes van het matras schoon gemaakt te worden met een desinfectant.

## Periodieke schoonmaak

### Matraskernen en zitkussenkernen

- Wij raden u aan de kern minimaal eens per twee jaar (zonder hoes) te laten luchten/ventileren.

### Soof®

- De kern van het Soof® matras en het Soof® zitkussen kunnen onder de waterstraal worden afgespoeld. Zorg er wel voor dat de kern goed droog is voor deze terug gaat in de hoes.

### Hoezen

- De hoes dient minimaal 1x per jaar gewassen te worden.
- De standaard IC-hoes is niet geschikt voor gebruik binnen een wasstraat. Deron heeft hiervoor aangepaste IC-hoezen in haar assortiment.


## Opslag

- Voordat het matras wordt opgeslagen dient deze te worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het matras kan daarna worden verpakt in plastic. De opslag moet uit een droge ruimte bestaan, waarbij blootstelling aan zonlicht vermeden dient te worden. Maximaal 15 matrassen op elkaar stapelen. Bij de opslag van smart matrassen dient vooraf de module afgekoppeld te worden. Deze module veilig en droog opslaan. De sensorkabels dienen opgerold achter de rits opgeslagen te worden.
- Voordat de hoes wordt opgeslagen dient deze te worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. De hoes kan daarna worden verpakt in plastic. De opslag moet uit een droge ruimte bestaan, waarbij blootstelling aan zonlicht vermeden dient te worden.

# Reiniging Stoffen hoes

## ALGEMEEN

Om de levensduur van het matras en de stoffen hoes te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen. Was de stoffen hoes minimaal 1x per jaar tot 30°C. De stoffen hoes is niet bestand tegen desinfectiemiddelen.

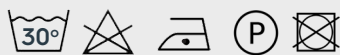

# Reiniging Ic-hoes

## ALGEMEEN

Om de levensduur van het matras en de ic-hoes te garanderen, is het van belang om het reinigingsprotocol te volgen. Was de ic-hoes minimaal 1x per jaar tot 95°C. Ook is de ic-hoes bestand tegen de onderstaande desinfectiemiddelen. Gebruik geen Jodtinktur.



Krimp na wassen ≤ 8%. Antimicrobieel effect kan gereduceerd zijn na wassen.

Product naam	Hoeveelheid
Incidin Plus (Ecolab)	2%
Kodan Tinktur Forte (Schulke)	Puur
Mikrobac Forte (Hartmann)	4%
Sodiumhypochlorite (Standaard)	1000 ppm
Octenispert (spray) (Schulke)	Puur
P3-topax 66 (Ecolab)	5%
Sagrotan (spray) (Reckitt Benckiser)	Puur
Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)	Puur
Spring (kalle Original)	Puur
Sprint 200 (Diversey)	2%
Suma Bac D10 (Johnson Diversey)	1%
Surfa'Safe (Anios Laboratories)	Puur
Topmax 421 (Ecolab)	5%
Virkon (Du Pont)	10 g/l

Volvone (Oyar)	40%
Actichlor Plus (Ecolab)	1000 ppm
Anios DDHS (Anios Laboratories)	Puur
B45 (Orochemie)	Puur
Bacillo 30 Foam (Hartmann)	Puur
Clinell Sporidical Wipes (Garna Healthcare)	Puur
Chlor-Clean tablets (Guest Medical)	1000 ppm
Dettol (Reckitt Benckiser)	5%
Dismozon Pur (Hartmann)	4%
Formaldehyde (Pharmacy)	30%
Germatol (kiarah Chem)	5%
Hansamed (spray) (beiersdorf AG)	Puur
Haz-Tabs (Guest Medical)	1000 ppm
Hibicet (Molnlycke Health Care)	puur
Incidin Extra N (Ecolab)	2%

# Reiniging Anti-Scheur

## ALGEMEEN

Gebruik geen oplosmiddelen/oplosmiddelhoudende schoonmaakontsmettingsmiddelen als Alcoholen. Desinfectie: De hoes kan worden ontsmet met desinfectans in waterige systemen, bv chloorpreparaten als bijvoorbeeld in tabel 1. Alsook middelen op basis van natriumhypochloriet, zie tabel 2.



Tabel 1 Chloorpreparaten	toelatingsnummer
Actisan-5L	8960N
Apesin Chlorine Tablets	13430N
Bakta desinfectietabletten	7161N
Chlorine Tabs	11400N
DeLaval chloortabletten	10662N
Disochlorine Chloortabletten	11292N
Medicarine	9451N
MelQuick	8813N
P3-ansep chloortabletten	6377N
Primetabs	13272N
Septitab	15883N
Staflex chloortabletten	6706N
Suma Tab D4	7321N
SynQ chloortabletten	11180N

Tabel 2 Natriumhypochloriet	toelatingsnummer
AkzoNobel 12.5-15% w/w	13693 N
BacForce EL 900 1	14424 N
Caldic Nahypochloriet	14962 N
Chloordes	14215 N
Chlorodes 150	13929 N
Chlorodes CIP SV	15655 N
Inwacide C-3697	14593 N
Neomoscan TE-350	15695 N
Orbin DES 1	15609 N
P3-hypochloran	7932 N
P3-topax 66 1	14513 N
Sanchlor 15%	14868 N
TC Foam H1	15686 N
Na-hypochloriet 14% Bioci	13737 N

Na reiniging met alcoholhoudende reinigers, afnemen met vochtige doek.